


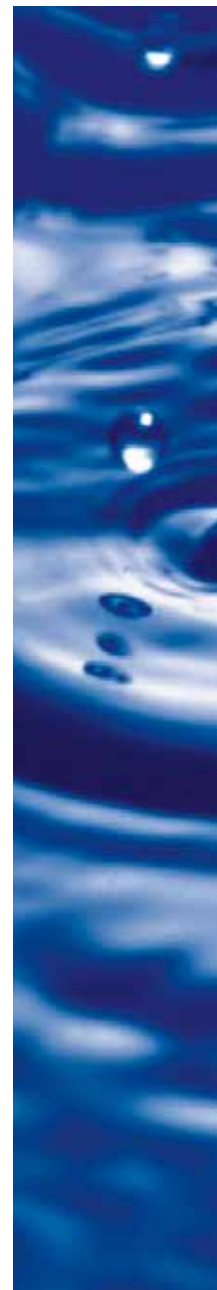

# SURFANIOS LEMON FRESH MD

Preparat do dezynfekcji  
i mycia powierzchni nie-  
inwazyjnych wyrobów  
medycznych.



- wysoka skuteczność biobójcza
- bardzo niskie stężenie roztworu roboczego 0,25%
- krótki czas działania
- doskonałe właściwości myjące
- nieograniczona kompatybilność materiałowa
- wysoka wydajność koncentratu
- przyjemny cytrynowy zapach

400 l roztworu z 1 l koncentratu



Wyrób medyczny kl. IIa, CE 0459

# SURFANIOS LEMON FRESH MD

Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

## PODSTAWOWE CECHY

- szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy
- aktywny wobec Legionella pneumophila, MRSA, VRE
- szeroka dokumentacja potwierdzająca skuteczność również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych (warunki brudne)
- bardzo niskie stężenie roztworu przy krótkim czasie działania: 0,25% – 15 minut
- bardzo wydajny – 400 litrów roztworu roboczego z 1 litra koncentratu
- ekonomiczny – bardzo niski koszt roztworu użytkowego
- doskonała kompatybilność materiałowa potwierdzona licznymi testami
- może być bezpiecznie stosowany w obecności pacjentów oraz na oddziałach noworodkowych
- bardzo dobre właściwości myjące roztworu sporządzonego zarówno w ciepłej jak i w zimnej wodzie
- każda 1-litrowa butelka wyposażona w dokładny, praktyczny dozownik przelewowy
- po wyschnięciu nie pozostawia smug i osadów, wydezynfekowana powierzchnia nie klei się, nie wymaga spłukiwania
- do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni preparat dostępny również w wersji bezzapachowej – SURFANIOS (produkt biobójczy, pozwolenie nr. 2351/05)

## SKŁAD

N-[3-aminopropyl]-N-dodecylopropano-1,3-diamina, chlorek didecyldimetyloamonowy, niejonowe związki powierzchniowo czynne, związki chelatujące, barwnik, substancja zapachowa

## SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

- 15 minut – 0,25%: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, H5N1, A H1N1)
- 60 minut – 0,25% warunki brudne: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HBV, A H1N1)

## SPOSÓB UŻYCIA

- Preparat do użytku profesjonalnego.
- Preparat w koncentracji – stosować po rozcieńczeniu.
- Odpowiednią ilość koncentratu dodać do odpowiedniej ilości ciepłej (max.+60°C) lub zimnej wody z kranu. Dodać 2,5 ml koncentratu na każdy 1 l wody (stężenie roztworu 0,25%).
- Przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek i mopów nasączonych roztworem preparatu. Dezynfekcję dużych powierzchni przeprowadzać stosując metodę dwóch wiader lub mopa jednego kontaktu.
- Przedmioty, które można zanurzyć dezynfekować przez zanurzenie.
- Po naniesieniu roztworu na powierzchnie odczekać minimum 15 minut.
- Po dezynfekcji nie zaleca się spłukiwania powierzchni wodą, z wyjątkiem powierzchni mających kontakt z żywnością, które należy zmyć dokładnie wodą zdatną do picia.

## OPAKOWANIA

- Surfianos: butelka – 1 l
- Surfianos: kanister – 5 l
- Surfianos Lemon Fresh MD: butelka – 1 l
- Surfianos Lemon Fresh MD: kanister – 5 l
- Wyposażenie dodatkowe: pompka dozująca 20 ml dostosowana do kanistra 5 l

## PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

PRODUCENT: Laboratoires Anios, Francja

DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • tel.: 85 747 93 00 • fax: 85 747 93 12 • [www.medilab.pl](http://www.medilab.pl)